

OP - Technik

1 Transfer des flüssigen Härtemittels

Öffnen der
Sterilverpackung



Spritzenspitze nach oben halten



Wahlventil im Uhrzeigersinn auf
„transfer“ - Position drehen



Den Stößel mit dem Kolben ver-
binden und herunterdrücken,...



... bis sämtliche Flüssigkeit in
die Kammer mit dem Pulver
geführt ist

2 Mischen des Pulvers mit dem flüssigen Härtemittel



Wahlventil muss auf „transfer“ -
Position stehen.



Flüssigkeit und Pulver mischen.
Sicherstellen, dass...



... das Produkt an beiden Enden
gründlich gemischt wird.

3 Direkte Injektion



Mischer bis zum Anschlag her-
ausziehen, Stößel entfernen und
an den Mixer klemmen.



Wahlventil im Uhrzeigersinn auf
„inject“ - Position stellen.



Falls erforderlich, Kanüle an-
schließen. Stößel und Mischer
zum Injizieren herunterdrücken.

4 Injektion mit Hilfe der Injektionspistole



Wahlventil muss auf „transfer“ - Position stehen.



Mischer bis zum Anschlag herausziehen und am unteren Ende abbrechen.



Spritze mit Injektionspistole verbinden.



Wahlventil im Uhrzeigersinn auf „inject“- Position stellen.




Falls erforderlich, Kanüle anschließen. Handgriff betätigen, um zu injizieren.



Produkt	Mischzeit bei 20°-22°C	Verarbeitungszeit bei 20°-22°C	Abbindezeit bei 37°C
Graftys® HBS <small>Hydrating Bone Substitute</small>	2 min.	15 min.	15 min.
Graftys® Quickset <small>Injectable Hydroxyapatite</small>	2 min.	2 min.	8 min.

Graftys - Eiffel Park- Bât. D - 415, rue Claude Nicolas Ledoux
Pôle d'activité d'Aix en Provence - 13 854 Aix en Provence Cedex 3 - France
Phone : +00 33 (0)4 42 60 30 00 - Fax : +00 33 (0)4 42 60 30 11
www.graftys.com

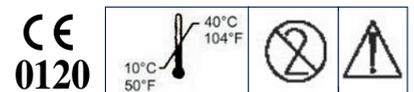

Graftys wird vertrieben in Deutschland durch:

endocon

endocon GmbH
Carl-Bosch-Str. 4
D-69115 Heidelberg
T +49 6211 7575 55
F +49 6211 7575 45
E info@endocon.de
I www.endocon.de